

Le lit doit être placé à 30 Cm du mur.

La commande du lit doit être déverrouillée en mode soin à l'aide de la clé qui sera donnée à chaque soignant afin de pouvoir utiliser toutes les fonctions du lit.

Mise en place du lit sur roulettes :

- 1- Sélectionner C puis appuyer sur E pour descendre le lit au maximum.
- 2- Lorsque le lit se bloque appuyer en même temps sur C et E.

Pour remettre sur patin :


- 1- Sélectionner C puis appuyer sur D. Le lit se bloquera automatiquement à 90cm.

Manipulation de la télécommande pour les soins :

- 1- Sélectionner la position souhaitée : A -B -C- F -G
- 2- Puis utiliser les flèches pour monter ou descendre (D - E)

Déverrouillage d'urgence :

Tirer sur la manette rouge (soit au niveau des jambes soit au niveau du buste, sous le sommier.

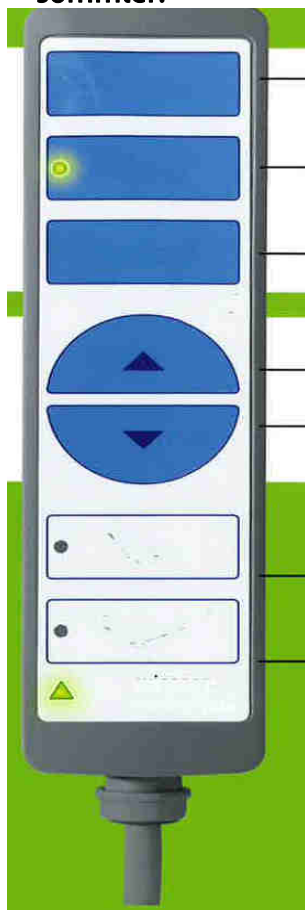

A : Relève buste

B : Position assise

C : Hauteur du lit

D : Monter

E : Descendre :

F : Position fauteuil /Position repas

G : Relève jambe -**Décaler le lit du mur**

<p>Nom : Fonction : Visa :</p>	<p>Rédacteur Amélie MAZEAUDOU Infirmière Coordinatrice</p>	<p>Validation Sylvie LACOSTE, Directrice</p>	<p>Conformité à la gestion qualité Audrey TINNES, Chargée Qualité</p>
--	---	---	--